



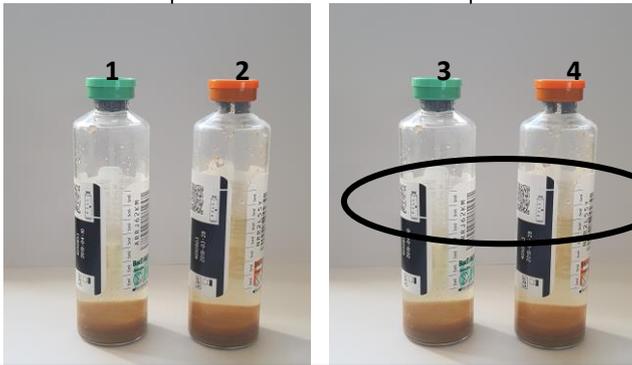

PONCTION UNIQUE = 4 X 10 ML

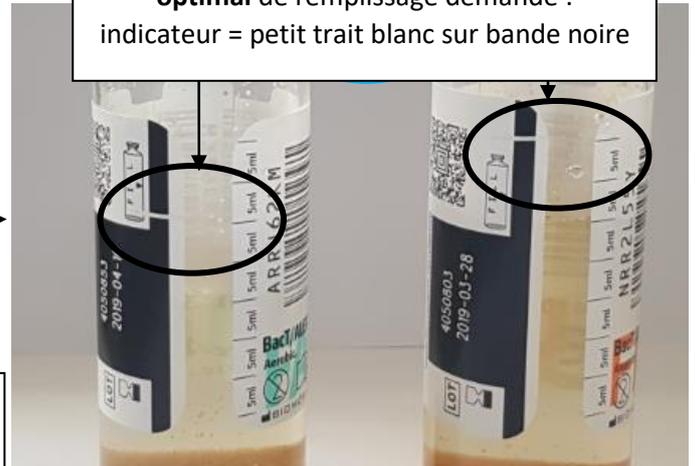

Marquage fournisseur pour le niveau  
**optimal** de remplissage demandé :  
indicateur = petit trait blanc sur bande noire



1 set de 4 flacons d'hémoculture (2 paires aéro-ana) à 6 flacons (3 paires aéro-ana si le prescripteur demande 3 hémocultures). Flacons à numérotter de 1 à 4 (ou de 1 à 6) Flacon n°1 aérobie\*, flacon n°2 anaérobie, flacon n°3 aérobie et flacon n°4 anaérobie, .....

*\*prélever IMPÉRATIVEMENT EN PREMIER 1 flacon AÉROBIE*

## REPLISSAGE DES FLACONS



Ne pas sur ou sous remplir les flacons mais se rapprocher du trait blanc

⇒ Volume attendu : entre 8 et 10 ml




LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

## ETIQUETAGE DES FLACONS



Coller l'étiquette patient verticalement

Zone de collage pour étiquette patient

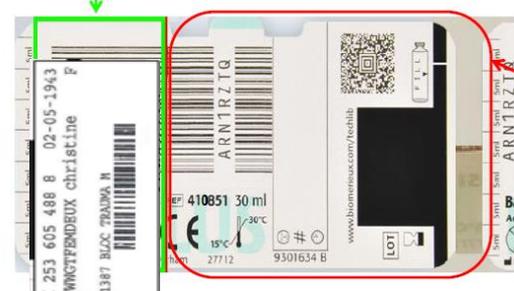

- Ne pas masquer :
- la ligne noire
  - le rectangle noir
  - Le code-barres
  - l'étiquette détachable