



## 1 INTERET DE L'EXAMEN

Recherche d'oeufs émis par la femelle oxyure sur la marge anale.



Adulte femelle



Oeufs

## 2 PRECAUTIONS

- **A effectuer au lever avant la toilette et avant d'aller à la selle.**
- Utiliser **impérativement** du scotch **transparent**, **ne pas utiliser** de scotch dit « invisible ».
- Prélèvement à réaliser de préférence au laboratoire.

## 3 MATERIEL






+



## 4 PRELEVEMENT

- Appliquer un ruban de **scotch transparent** sur le pourtour de l'anus en appuyant pour bien pénétrer dans les plis radiés de l'anus. (figure 1)
- Retirer le scotch et le coller soigneusement, **sans faire de plis** sur la lame de verre fournie par le laboratoire. (figure 2)
- Recommencer une 2<sup>e</sup> fois en appliquant de la même façon un nouveau ruban de scotch, puis en le collant sur la 2<sup>e</sup> lame de verre.
- Placer les lames dans une enveloppe. **L'identifier avec nom et prénom**. Noter la date et l'heure de recueil. (figure 3)

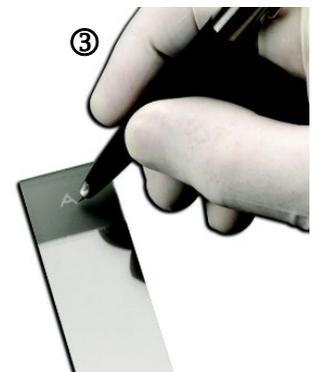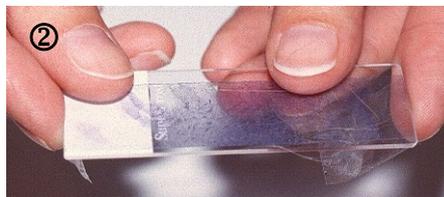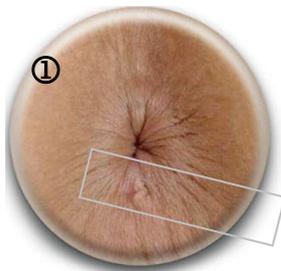

## 3 TRANSPORT - CONSERVATION

- Apporter le prélèvement (placé dans une enveloppe identifiée) dans les **10h maxi** au laboratoire à température ambiante.