



Le respect des recommandations de prélèvement est essentiel au recueil correct du virus.

KIT D PRELEVEMENT	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 329 368 398">Sachet rouge</td> <td data-bbox="368 329 730 398">Sachet interne + buvard absorbant</td> <td data-bbox="730 329 930 398">Flacon stérile</td> <td data-bbox="930 329 1182 398">Pipette de transfert souple graduée</td> <td data-bbox="1182 329 1471 398">Tube de transport Milieu liquide Amies 3 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">  <p>Fiche de renseignements à compléter en cochant la case <u>"PRELEVEMENT SALIVAIRE"</u></p> </td> </tr> </table>	Sachet rouge	Sachet interne + buvard absorbant	Flacon stérile	Pipette de transfert souple graduée	Tube de transport Milieu liquide Amies 3 ml						 <p>Fiche de renseignements à compléter en cochant la case <u>"PRELEVEMENT SALIVAIRE"</u></p>				
Sachet rouge	Sachet interne + buvard absorbant	Flacon stérile	Pipette de transfert souple graduée	Tube de transport Milieu liquide Amies 3 ml												
																
 <p>Fiche de renseignements à compléter en cochant la case <u>"PRELEVEMENT SALIVAIRE"</u></p>																
REALISATION DU TEST	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <p>Dans la ½ heure précédent le recueil salivaire</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ne pas boire ni manger</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ne pas fumer (cigarette/e-cigarette)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ne pas effectuer de brossage de dents ou de rinçage de la bouche</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notez ses Nom, Prénom et Date de naissance sur le flacon et le tube 2. Salivez pendant 30 secondes dans la bouche 3. Crachez sans effort de toux ni raclement de gorge dans le flacon stérile 4. Renouvelez l'opération si nécessaire afin d'obtenir un volume de salive de 1 à 2 ml <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">    </div>															
APRES LE RECUEIL	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; margin: 0 10px;">  </div>  </div> <p>Après le recueil transférer minimum 0.5 ml de salive dans le tube, jeter la pipette et le flacon, disposer le tube identifié dans le sachet transparent avec le buvard puis dans le sachet rouge et la fiche de renseignement dans la pochette devant complétée et la case <u>"PRELEVEMENT SALIVAIRE"</u> cochée.</p> <p>Transmettre rapidement au laboratoire ou conserver à température réfrigérée maximum 48h</p>															